

Sterilt batteri til MatrixPRO™ driver

Brugsanvisning (DET STERILE BATTERI MÅ IKKE GENBRUGES)

Sterilt batteri til DePuy Synthes MatrixPRO™ driver (05.000.021S)

Beskrivelse og indikationer:

Batterierne er til brug med DePuy Synthes MatrixPRO driver. Jævnfør venligst brugsanvisningen til MatrixPRO driver for en samlet beskrivelse af batterianvendelse med MatrixPRO driver (05.000.020).

ADVARSLER:

- Må ikke genbruges, vaskes, steriliseres eller autoklaveres
- Batteriet må ikke opvarmes til temperaturer over 80° C/176° F

Advarsler:

- Undgå at placere batteriet med kontakter pegende nedad på metaloverflader.
- Bortskaf batteriet i henhold til hospitalets politik eller lokal lovgivning.

Brugsanvisning 05.000.021S – sterilt batteri til MatrixPRO driver (kun til éngangsbrug – må ikke gensteriliseres)

Batteripakken er blevet steriliseret ved hjælp af gammastråling. Fjern batteripakken fra poserne (indre og ydre) i henhold til hospitalets protokol og anvend aseptiske teknikker ved alle overførselsprocedurer. Inspicér poserne for tegn på skader før brug. Hvis poserne viser tegn på skader må batteripakken IKKE bruges. Der findes ingen godkendt metode til gensterilisering af batteriet.

For at isætte det **sterile batteri** i MatrixPRO **driver** justeres den sorte pil på batteriet så den passer med den hvide pil på driveren. Isæt batteriet, så det sidder godt fast i batterimonterings ring, indtil fligene ”klikker” og låser batteriet godt fast. Træk forsigtigt i batteriet, for at bekræfte, at det sidder godt fast.

Skub og hold én af knapperne (i mindst 1 sekund), for at initiere driverens selvtest og tænde, så den er klar til brug. Driverens motor skal fungere, når selvtesten er gennemført, efter 3-5 sekunder.

Jævnfør brugsanvisningen til DePuy Synthes MatrixPRO driver for den samlede betjeningsvejledning.





BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af affald skal være i overensstemmelse med gældende føderale, statslige og lokale bestemmelser.










Fejlfinding:

Problem	Løsning
Driveren stopper under drift og vil ikke genstarte, når der trykkes på knappen	Batteriet er dødt. Brug et nyt batteri.
Driveren tænder ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Bekræft, at selvdiagnostisk test er gennemført uden problemer som indikeret ved konstant lys under knapperne.• Hvis problemet varer ved fjernes batteriet og skiftes ud med et nyt (ubrugt) batteri. Gennemfør selvdiagnostisk test og lad den fuldføre som angivet ved konstant lys under knapperne.• Hvis problemet varer ved må MatrixPRO driver ikke bruges og returneres til DePuy Synthes til reparation eller udskiftning.

SYMBOLER

	Producent/fremstillingsdato		Brug inden
V	Volt	DC (Direct Current – international betegnelse for jævnstrøm)	Jævnstrøm
	Katalognummer		Batchkode

Sterilt batteri til MatrixPRO™ driver
Brugsanvisning (DET STERILE BATTERI MÅ IKKE GENBRUGES)

	Steriliseret med bestråling		Kvantitet
	Må IKKE genbruges		Må ikke autoklaveres
	Adskilt indsamling		Må IKKE brændes
	Må ikke nedsænkes		Justeringspile på driver/batteri
	Overholder det europæiske direktiv for medicinsk udstyr		

Tekniske specifikationer:

Produktnummer: 05.000.021S

Klassifikation: Selvstændig elektrisk strømkilde. Opfylder IEC 60601-1:2005/A1:2012, udgave 3.1 (3. udgave + ændring 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 nr. 60601-1:14.

Effekt: 8 V, 550 mAh

Type: Primært (ikke-genopladeligt), litiummetal

Kemi: Litium-nikkel-koboltoxid

Driftsbetingelser: 10° C til 35° C (50° F til 95° F): 20 % til 75 % relativ fugtighed ikke-kondenserende, 70 kPa til 106 kPa, kun til indendørs brug

Driftshøjde: Maks. 3000 m

Forsendelse og opbevaring: -20° C til 60° C (-4° F til 140° F): 5 % til 95 % relativ fugtighed ikke-kondenserende, 47 kPa til 106 kPa, kun til indendørs brug.

Ifølge den føderale lovgivning (USA) må denne enhed kun sælges af eller på ordination af en læge.

Distribueret af DePuy Synthes:



Synthes USA, LLC
 1101 Synthes Avenue
 Monument, CO 80132
 Telefon: (719) 481-5300
 Til bestilling: (800) 523-0322
 Fax: (800) 796-8437

Synthes GmbH
 Eimattstrasse 3
 4436 Oberdorf
 Schweiz
 Telefon: +41 61 965 61 11
 Fax: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com

Fremstillet af Pro-Dex:



Pro-Dex, Inc.
 2361 McGaw Ave.
 Irvine, CA 92614
 Telefon: (800) 562 6204
 Fax: (949) 769-3281

Autoriseret repræsentant:

European Compliance Services
 Greyfriars Court
 Paradise Square
 Oxford, OX11BE, Storbritannien
 +44(0)1793 784 113