

Стерильная батарея для шуруповерта MatrixPRO™ Инструкции по использованию (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВТОРНО СТЕРИЛЬНУЮ БАТАРЕЮ)

Батарея для шуруповерта DePuy Synthes MatrixPRO™ — Стерильная (05.000.021S)

Описание и показания к применению:

Батареи предназначены для использования с шуруповертом MatrixPRO от DePuy Synthes. Полное описание использования батареи с шуруповертом MatrixPRO см. в инструкциях к шуруповерту MatrixPRO (05.000.020).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не используйте повторно, не мойте, не стерилизуйте и не применяйте автоклав для обработки устройства.
- Не нагревайте батарею до температуры выше 80°C

Предостережения:

- Не устанавливайте батарею контактами вниз на металлическую поверхность.
- Утилизируйте батарею в соответствии с правилами больницы или местными нормативами.

Инструкции по использованию 05.000.021S — Батарея для шуруповерта MatrixPRO — Стерильная (только для однократного применения — не стерилизовать повторно)

Батарея простерилизована гамма-облучением. Извлеките батарею из упаковки (внутренней и внешней) в соответствии с протоколом больницы и используйте асептические процедуры переноса. Перед использованием визуально осмотрите упаковку на предмет повреждений. Если на упаковке видны признаки повреждения, НЕ используйте батарею. Утвержденного метода повторной стерилизации батареи не существует.

Чтобы установить **Батарею для отвертки MatrixPRO стерильную**, совместите черную стрелку на батарее с белой стрелкой на шуруповерте. Плотно вставьте батарею в крепежное кольцо для батареи до «защелкивания» и зафиксируйте батарею на месте. Осторожно потяните батарею, чтобы убедиться, что она зафиксирована на месте.

Нажмите и удерживайте (в течение не менее 1 секунды) одну из кнопок, чтобы запустить самодиагностику шуруповерта, и нажмите на кнопку включения питания в режим готовности. Мотор шуруповерта должен заработать через 3–5 секунд после завершения самодиагностики.

Полные инструкции по эксплуатации см. в инструкциях по использованию шуруповерта DePuy Synthes MatrixPRO.



УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с действующими федеральными, государственными и местными нормативами.










Устранение неполадок:

Проблема	Решение
Шуруповерт останавливается во время работы и не перезапускается при нажатой кнопке	Батарея разрядилась. Используйте новую батарею.
Шуруповерт не включается	<ul style="list-style-type: none"> • Запустите проверку самодиагностики и убедитесь, что она успешно завершена, о чём свидетельствует постоянно горящий свет под кнопочной панелью. • Если проблема не устранена, удалите батарею и замените ее новой (неиспользованной) батареей. Запустите проверку самодиагностики и убедитесь, что она успешно завершена, о чём свидетельствует постоянно горящий свет под кнопочной панелью. • Если проблема не устранена, не используйте MatrixPRO Driver — верните шуруповерт компании DePuy Synthes для ремонта или замены.

СИМВОЛЫ

	Производитель/Дата выпуска		Использовать до
V	Вольты	DC	Постоянный ток
REF	Номер по каталогу	LOT	Код партии

Стерильная батарея для шприцоперта MatrixPRO™
Инструкции по использованию (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВТОРНО СТЕРИЛЬНУЮ БАТАРЕЮ)

	Стерилизовано облучением		Количество
	НЕ используйте повторно		Не автоклавировать
	Раздельный сбор		НЕ сжигать
	Не погружать в жидкость		Стрелка совмещения батареи/шприцоперта
	Соответствует Европейской директиве по медицинскому оборудованию		

Технические характеристики:

Номер изделия: 05.000.021S

Классификация: Автономный источник электропитания. Соответствует IEC 60601-1:2005/A1:2012, выпуск 3.1 (3-й выпуск + Поправка 1), ANSI/AAMI 60601-1:2005(R) 2012/A1:2012, CSA C22.2 NO 60601-1:14.

Номинальная мощность: 8 В, 550 мА/ч

Тип: Первичный (не перезаряжаемый), металлический литий

Химический состав: Никель литий кобальт оксид

Условия эксплуатации: от 10°C до 35°C: От 20 % до 75 % относительной влажности без конденсации, от 70 кПа до 106 кПа, только для использования в помещении

Рабочая высота: 3000 м макс.

Условия транспортировки и хранения: от -20°C до 60°C: От 5 % до 95 % относительной влажности без конденсации, от 47 кПа до 106 кПа, только для использования в помещении

Согласно федеральному законодательству (США) данное устройство может продаваться только врачу или по заказу врача.

Дистрибьютор — DePuy Synthes:



Synthes USA, LLC
 1101 Synthes Avenue
 Моньюмент, штат Колорадо
 80132 (США)
 Телефон: (719) 481-5300
 Для заказа: (800) 523-0322
 Факс: (800) 796-8437

Synthes GmbH
 Eimattstrasse 3
 4436 Обердорф
 Швейцария
 Телефон: +41 61 965 61 11
 Факс: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com

Изготовитель — Pro-Dex:



Pro-Dex, Inc.
 2361 McGaw Ave.
 Ирвин, штат Калифорния 92614
 (США)
 Телефон: (800) 562 6204
 Факс: (949) 769-3281

Официальный представитель

European Compliance Services
 Greyfriars Court
 Paradise Square
 Оксфорд, OX11BE,
 Великобритания
 +44(0)1793 784 113